

PRP TUBES



T-LAB PRP SKÚMAVKY
s objemom 10 ml
sterilné a vákuové

Protokoly

1. Odber krvi pomocou skúmaviek PRP od spoločnosti T-LAB


SKÚMAVKY PRP od spoločnosti T-LAB sú vákuové skúmavky s objemom 10 ml, ktoré obsahujú 1 ml antikoagulačného roztoku a sú pripravené výlučne na odber plazmy bohatej na krvné doštičky (PRP). Vďaka vákuu v skúmavkách je možné odobrať plnú krv, keďže krv sa nasáva priamo do skúmavky, čím sa celý proces stáva jednoduchým a rýchlym. Každé balenie SKÚMAVIEK PRP od spoločnosti T-LAB obsahuje **2 skúmavky**, čo znamená, že je možné odobrať až **18 ml** krvi. Po odbere krvi do skúmaviek nezabudnite skúmavky jemne pretrepať, aby sa antikoagulačný roztok premiešal s krvou.

2. Centrifugácia SKÚMAVIEK PRP od spoločnosti T-LAB


Protokol pre PURE PRP: 4 minúty a 830G (RCF)
v priemere **2300 RPM**

Protokol pre AMBER PRP: 8 minút a 830G (RCF)
v priemere **2300 RPM**

3. PURE PRP/Čistá PRP, neobsahuje leukocyty ani erytrocyty

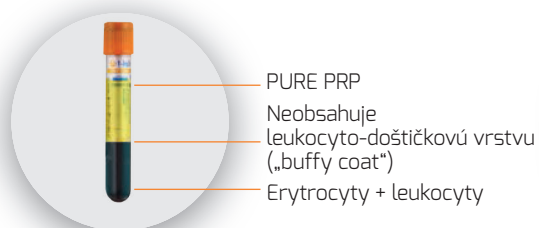


4. AMBER PRP/Obohatená PRP, PRP obohatená o leukocyty

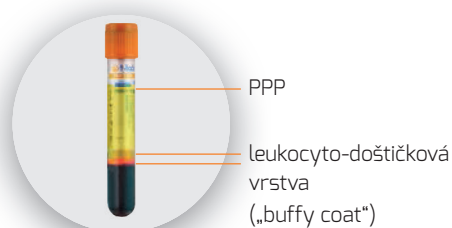


- PURE PRP, neobsahuje leukocyty ani erytrocyty
- Neobsahuje leukocyto-doštičkovú vrstvu („buffy coat“)
- Vysoká miera obnovy krvných doštičiek
- Výsledný produkt: extra veľký objem ~4 ml

- AMBER PRP, obohatená o leukocyty
- Leukocyto-doštičková vrstva („buffy coat“)
- PRP s vysokou hustotou
- Výsledný produkt: ~2 ml v každej skúmavke

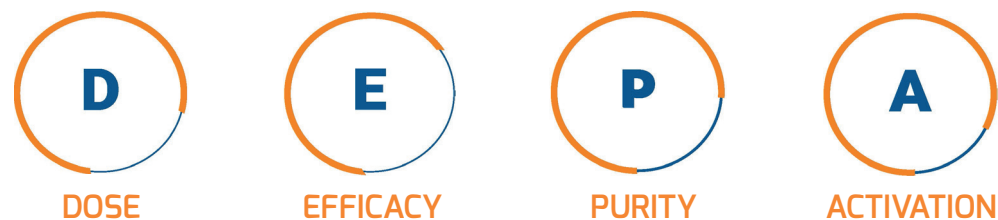

VÝSLEDKY PODĽA KLASIFIKÁCIE DEPA PRE SKÚMAVKY PRP OD SPOLOČNOSTI T-LAB ¹⁻²

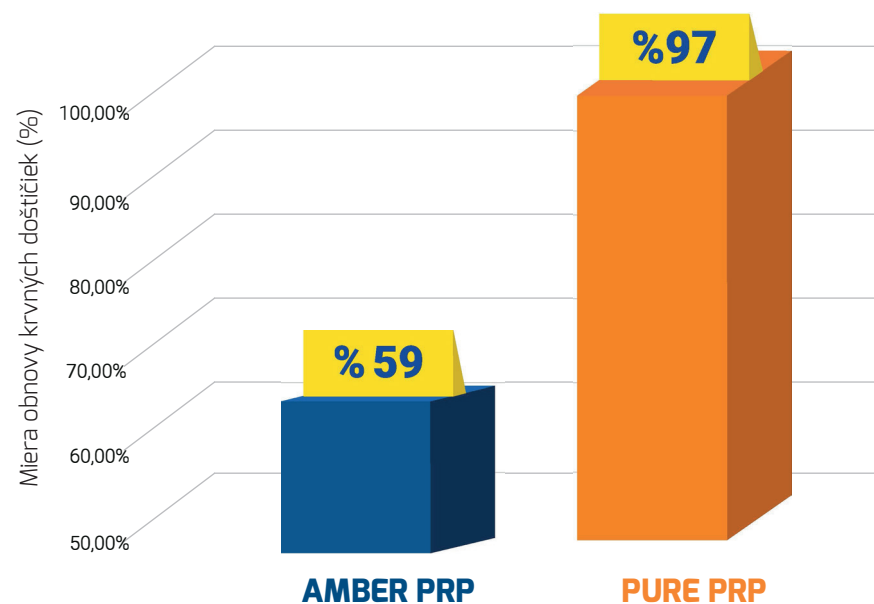

* Vysoká miera obnovy krvných doštičiek

Ref1. 1 T Biyoteknoloji AR GE Laboratory

Ref2. J. Magalon a kol. DEPA Classification: a proposal for standardising PRP use and a retrospective application of available devices. BMJ Open Sport Exerc Med 2016;2.

* Premenná hodnota

Vylúčenie právnej zodpovednosti:

Cieľom obsahu tejto brožúrky je výlučne všeobecná informovanosť a brožúrka neslúži na poskytovanie poradenstva týkajúceho sa našich produktov, medicíny, zdravia alebo chorôb. Uvedené informácie nenahrádzajú odporúčania lekára ani neslúžia na stanovenie lekárskeho diagnózy alebo liečby. Pred začatím akejkoľvek liečby súvisiacej s uvedenými produktmi sa dôrazne odporúča poradiť sa o svojom zdravotnom stave alebo ochorení so svojím lekárom.

Dovoz a výhradný predaj pre Slovensko: Zöllner Medical International, s. r. o.

ZÖLLNER
MEDICAL
Dermal Fillers | Mesotherapy | Peelings

Tel: +421 903 483 737, +421 911 373 743
info@zollnermedical.com
www.dermalnevyplne.sk